

Nová kontrolná súprava PreciControl Varia



Dátum: 16. mája 2011

PreciControl Varia

kat. č. 05618860-190

nahradí doterajšie kontroly:

PreciControl Anemia a PreciControl Bone

Vážení zákazníci,

firma Roche uvádza na trh novú kontrolnú súpravu PreciControl Varia na kontrolu kvality imunochemických analýz na analyzátoroch Elecsys a **cobas e**.

Kontroly sú lyofilizované, na báze ľudského séra, v dvoch hladinách a nahradia doterajšie produkty PC Anemia a PC Bone. Každá hladina má 2 fľaštičky á 3 ml kontroly.

Sú v nich obsiahnuté tieto analyty: Vitamín B12, Feritín, Foláty, β -CrossLaps, Osteokalcín, total P1NP, PTH, PTH (1-84) a nový Vitamín D total. PC Varia nie je vhodná pre kontrolu kvality súpravy Vitamin D3 (25-OH), kat. č. 03314847-190.

Určitú prechodnú dobu (cca 1 rok) budú k dispozícii doterajšie produkty. Prvá dostupná šarža novej kontroly PC Varia bude mať lot 163 809, s expiráciou 05/2012.

Stabilita analytov po rekonštitúcii v novej kontrole je :

- ✓ pri -20°C 31 dní
- ✓ pri 2-8°C 72 hodín
- ✓ pri 20 – 25°C 5 hodín

Doterajšie kontroly (PC Anemia a PC Bone) môžu byť paralelne používané s PC Varia do doby expirácie.

Súprava PreciControl Varia nemôže byť používaná v kombinácii s diagnostickou súpravou Elecsys Vitamin D3 (25-OH), kat. č. 03314847-190.

Nová kontrola PC Varia bude dostupná aj v QCS ponuke pre rok 2012.

Nová kontrola PC Varia bude mať približne takéto zloženie:

analyt	cieľová konc.		jednotky
	PC V 1	PC V 2	
vitamín B12 (bunková kultúra)	500	1000	pg/ml
feritín (ľudská pečeň)	150	1000	ng/ml
foláty (syntetické)	3,9	12	ng/ml
β-CrossLaps (syntetické)	320	750	pg/ml
osteokalcín (syntetický)	20	100	ng/ml
Total P1NP (ľudský)	30	200	ng/ml
PTH (syntetický)	60	200	pg/ml
PTH (1-84) (syntetický)*	45	140	pg/ml
25 (OH) Vitamin D (syntetický)	20	40	ng/ml

(*) Elecsys PTH (1-84) je vo vývoji a plánuje sa uviesť na trh v Q3/2011.

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené čísla šarží diagnostických súprav, ktoré môžu byť použité v kombinácii s novou kontrolou PC Varia:

test	kat.č.	č.šarže	expirácia
Vitamin B12	04745736-190	160807	10 / 2011
Folate III	04476433-190	160446	02 / 2012
Ferritin 100	03737551-190	163473	09 / 2012
Ferritin 200	04491785-190	161738	06 / 2012
Osteocalcin	12149133-122	159438	12 / 2011
β-CrossLaps	11972308-122	160375	03 / 2012
tP1NP	03141071-190	159651	12 / 2011
PTH	11972103-122	159184	11 / 2011
PTH STAT	04892470-190	159185	11 / 2011
Vitamin D total	05894913-190	163429	08 / 2011

Z logistických dôvodov však nemusia byť vo všetkých týchto súpravách vložené informácie o PC Varia.

V prípade Vašich ďalších otázok nás neváhajte kontaktovať.



Eleonora Varmusová

Roche Slovensko, s.r.o.

Sales Manager

Immunochemistry Product Specialist

Orange SK: +421 918 117 452

eleonora.varmusova@roche.com

Lazaretská 12

811 08 Bratislava, Slovakia