


# Urisys 1100

## Analyzátor na vyšetrenie moču Stručný návod na obsluhu

### Meranie pomocou vyšetrovacích prúžkov

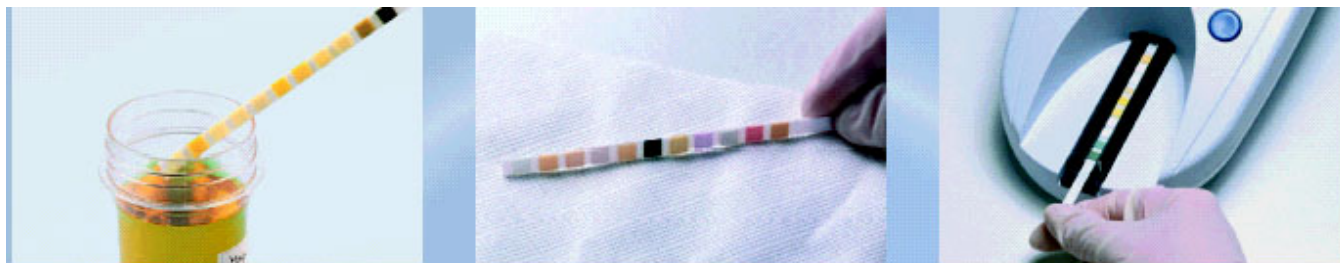

**1** Vyšetrovací prúžok krátko (na 1 sekundu) ponorte do vzorky moču. Otrite ho dlhšou bočnou hranou o okraj nádoby a tak zbavte prebytočného moču.

**2** Prúžok potom krátko (asi na 1 sekundu) priložte jeho bočným okrajom a rubovou stranou k savému papieru, aby ste odstránili prebytočný moč.

**3** Vložte prúžok políčkami nahor na podávač vyšetrovacích prúžkov. Koniec prúžku je nutné zasunúť čo najďalej pod svorku. Pod svorkou musia byť uchytené asi 2 mm prúžku.

Používejte Combur<sup>10</sup>Test UX,  
REF 11 544 373.



**Vyšetrovací prúžok neohýbajte!**



**4** Stlačte tlačidlo START. Po potvrdzujúcom pípnutí sa uzavrie západka. Vyšetrovací prúžok musí byť v drážke podávača umiestnený v správnej polohe.

**5** Pokiaľ je to potrebné, posuňte prúžok do správnej polohy ručne. Je **dôležité**, aby **správne umiestnenie** prúžku a stlačenie tlačidla START bolo uskutočnené **5-10 sekúnd po namočení prúžku**.

**6** Po skončení merania vyšetrovací prúžok vyberte a zlikvidujte. Zotrite všetky zbytky moču handričkou, ktorá nechlpí. Podrobné pokyny sú uvedené v Užívateľskej príručke.

## Kalibrácia



Upozornenie: Kalibrácia pomocou kalibračných prúžkov Control-Test M, REF 11 379 194 je nutná iba v prípade, že Urisys 1100 chcete používať s prúžkami Combur<sup>10</sup>Test UX.

Kalibrujte raz za 7 dní alebo keď sa na displeji zobrazí správa "REPEAT CALIBRATION" /"OPAKOVAŤ KALIBRÁCIU"/.

**1** Pokiaľ je na displeji zobrazená správa "REPEAT CALIBRATION", stlačte ľavé funkčné tlačidlo "YES". Objaví sa správa "START CALIBRATION".

Pokiaľ je analyzátor v režime Ready-to-Measure /Pripravený na meranie/, stlačením ľavého funkčného tlačidla zvolíte "Calibr.". Objaví sa správa "START CALIBRATION".

**2** Vložte kalibračný prúžok na

podávač políčkami nahor. Asi 2 mm prúžku musia byť uchytené pod svorkou.

**3** Stlačte tlačidlo START.

**4** Ak je kalibrácia platná a správne vykonaná, vytlačí sa správa "CALIBRATION O.K.".

**5** Ak sa na displeji objaví niektorá z nasledujúcich správ, postupujte ďalej podľa Užívateľskej príručky:

- "REFERENCE PAD ERROR!" /"Chyba referenčného políčka!"/
- "CALIBRATION INVALID!" /"Neplatná kalibrácia!"/
- "CALIBRATION ERROR!" /"Chyba kalibrácie!"/

## Denná údržba



Raz denne očistite podávač vyšetrovacích prúžkov vodou a dezinfekčným prostriedkom.

**1** Vypnite prístroj.

**2** Vytiahnite podávač z prístroja.

**3** Opláchnite pod tečúcou vodou.

**4** Mäkkou kefkou odstráňte všetky kryštalické usadeniny, zvlášť tie, ktoré kontaminujú

mechanizmus západky alebo ozubenia na spodnej časti podávača.

**5** Otrite podávač vyšetrovacích prúžkov 70% alkoholom alebo iným vhodným dezinfekčným prostriedkom. Dosušte handričkou, ktorá nechlpí.

**6** Nasadte podávač do prístroja.

**7** Zapnite prístroj.

## Výmena papiera v tlačiarňi



**1** Otvorte kryt tlačiarne stisknutím štrukturovanej plochy pod krytom a vyberte starý kotúč papiera.

**2** Vložte nový kotúč papiera tak, aby sa odvíjal zospodu a papier vytiahnite dopredu cez hranu štrbiny tlačiarne.

**3** Kryt znovu zavrite jeho pritlačením dolu, až budete počuť kryt zapadnúť na svoje miesto. Papier musí prechádzať štrbinou tlačiarne.

Upozornenie: Vytlačený výsledok pacienta odtrhnite pretiahnutím cez hranu tlačiarne.

## Technický servis

Pokiaľ po prečítaní Užívateľskej príručky máte akékoľvek otázky alebo potrebujete technickú pomoc, obráťte sa prosím na zastúpenie Roche Slovensko, Diagnostics Division.

Urisys, Urisys 1100 and Combur-Test are trademarks of a Member of the Roche Group.

[www.roche.sk](http://www.roche.sk)

[www.diavant.com](http://www.diavant.com)

[www.roche-diagnostics.com/npt](http://www.roche-diagnostics.com/npt)

Roche Slovensko s.r.o.

Diagnostics Division

Lazaretská 12

811 08 Bratislava 1

© 2007 Roche Diagnostics